

Guide d'utilisation potence de lit

En cas d'incident grave avec le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays.

1.1 Conformité

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de notre entreprise, qui travaille conformément à la norme ISO 13485.

Ce produit porte le label CE et est conforme à la Réglementation sur les dispositifs médicaux de classe I 2017/745. La date de lancement de ce produit est indiquée dans la déclaration de conformité CE.

Nous nous efforçons en permanence de réduire au minimum notre impact sur l'environnement, à l'échelle locale et mondiale.

Nous n'utilisons que des matériaux et composants conformes au règlement REACH.

1.2 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

1.3 Limitation de responsabilité

Invacare décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

- un non respect du manuel d'utilisation,
- une utilisation incorrecte,
- l'usure normale,
- un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers,
- des modifications techniques,
- des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

2 Sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure

- Vérifiez systématiquement que la potence est correctement positionnée et qu'elle repose sur une surface plane.
- Ne procédez à aucun réglage lorsque la potence est en cours d'utilisation.
- Après chaque réglage de la poignée de levage, vérifiez que le cordon et la poignée sont bien fixés.
- Soyez plus particulièrement vigilant(e) lors de l'utilisation d'une section tête manuelle ou électrique pour faciliter le soulèvement du patient.
- Éloignez la potence du lit avant d'utiliser un dispositif de levage pour placer le patient hors du lit ou sur le lit.
- Ne modifiez aucune partie de la potence. Utilisez uniquement des pièces de rechange Invacare d'origine.
- Après chaque montage, vérifiez que tous les raccords sont bien serrés et que toutes les pièces fonctionnent correctement.

Utilisation prévue

La potence est conçue pour aider les utilisateurs à soulever la partie supérieure de leur corps lorsqu'ils sont allongés sur 1567504-C

un lit médicalisé. Elle doit être utilisée avec des lits qui ne sont pas équipés d'un système de réglage de la hauteur.

2.1 Étiquettes et symboles figurant sur le produit

Étiquette du produit



Symboles

	Numéro de lot
	Numéro de référence
	Adresse du fabricant
	Date de fabrication
	Charge max. d'utilisation pour un fonctionnement sûr
	Consultez le manuel d'utilisation
	Conformité européenne
	Dispositif médical

3 Montage (Fig. 1)



Deux clés de 10 mm

- Ⓐ Base (1 unité)
- Ⓑ Vis TE M6x50 (2 unités)
- Ⓒ Écrou borgne M6 (2 unités)
- Ⓓ Tube de raccordement (1 unité)
- Ⓔ Tube coudé (1 unité)
- Ⓕ Poignée de levage avec cordon (1 unité)
- Ⓖ Embout Ø40 (4 unités)
- Ⓗ Embout de la base (2 unités)

1. Fixez la base Ⓐ au tube de raccordement Ⓓ au moyen d'une vis Ⓑ et d'un écrou borgne Ⓒ.
2. Fixez le tube coudé Ⓔ au tube de raccordement Ⓓ au moyen de la deuxième vis Ⓑ et d'un écrou borgne Ⓒ. Sélectionnez le trou le plus adapté en fonction de la hauteur souhaitée.
3. Positionnez la poignée de levage Ⓕ, de sorte que le renfort en caoutchouc reste bloqué entre les deux broches du tube coudé supérieur.

4 Utilisation

1. Placez la potence dans la partie tête du lit, la base étant complètement positionnée sous le lit.
2. Réglez la longueur du cordon de façon à ce que le patient puisse saisir la poignée de levage des deux mains.
 - a. Desserrez le cordon et maintenez-le tout en faisant glisser le système de blocage en plastique vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la poignée se trouve à la hauteur souhaitée.
 - b. Pour verrouiller la poignée, réintroduisez le cordon dans le système de blocage et tirez la poignée vers le bas.
 - c. Vérifiez que les deux cordons au-dessus du système de blocage sont parallèles et assurez-vous que le cordon est bien verrouillé en tirant fort sur la poignée.
3. Vous pouvez relever la partie tête du lit pour que l'utilisateur atteigne plus facilement la poignée de levage.

5 Maintenance et nettoyage

Avant chaque utilisation

- Vérifiez que les vis et les écrous sont bien serrés et que le cordon ne présente aucun signe de dommage.

Tous les deux ans

Le produit n'exige aucune maintenance spéciale. Nous vous conseillons cependant d'effectuer des contrôles réguliers tous les deux ans au moins :

- Assurez-vous que les vis et les écrous sont bien serrés.
- Vérifiez que les tubes sont correctement positionnés.
- Vérifiez que le cordon ne présente aucun signe de dommage.
- Vérifiez les raccords et les fixations.
- Procédez à un examen visuel de la potence afin de déceler d'éventuels dommages.

En cas de dommages ou de problèmes, veuillez contacter votre distributeur ou votre représentant Invacare.

Nettoyage

- Nettoyez le produit avec une éponge ou un chiffon humide et séchez-le immédiatement.
- Utilisez des détergents ménagers habituels pour le nettoyage. N'utilisez pas d'agents nettoyants acides ou alcalins, ni de solvants comme l'acétone ou du diluant cellulosique.
- Ne nettoyez pas le produit dans des installations de lavage automatique, ni à l'aide d'un appareil de nettoyage équipé d'un jet d'eau.

6 Mise au rebut

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage.

Désassemblez le produit et ses composants afin que les différents matériaux puissent être séparés et recyclés individuellement.

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de l'emballage doivent respecter la législation et les règlements relatifs à la gestion des déchets de chaque pays. Contactez votre organisme local de traitement des déchets pour plus d'informations.

7 Reconditionnement

Ce produit peut être réutilisé. Pour reconditionner le produit en vue de son utilisation par un nouvel utilisateur, il convient d'effectuer les opérations suivantes :

- Inspection
- Nettoyage et désinfection

Reportez-vous à la section *Maintenance* pour plus d'informations.

Assurez-vous de remettre le manuel d'utilisation avec le produit.

Si un dommage ou un dysfonctionnement est détecté, le produit ne doit pas être réutilisé.

8 Caractéristiques techniques

Hauteur réglable	182 cm à 200 cm
Poignée de levage réglable en hauteur	122 cm à 164 cm
Charge maximale d'utilisation	80 kg
Poids	7 kg
Matériau du châssis	Tube en acier chromé
Matériau de la base	Tube en acier peint