

## NOTICE DESTINÉE AUX UTILISATEURS

### *PIEDS A SERUM COMED*



**COMED SAS**  
 Parc des Forges - 8 rue Louise Michel  
 67200 STRASBOURG - France

☎ : +33(0)3 88 77 13 00

@ : [info@comed.fr](mailto:info@comed.fr)

#### *Exigences générales en matière de sécurité et de performances du Règlement (UE) 2017/745 (chapitre III de l'annexe I, §23.1.d) :*

*« une notice d'utilisation est fournie avec les dispositifs. À titre d'exception, une notice d'utilisation n'est pas requise pour les dispositifs des classes I et IIa si ceux-ci peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide d'une telle notice et sauf si indication contraire ailleurs dans la présente section; »*

#### UTILISATION :

Suspendre les poches, les paniers porte-sérum ou les flacons à sérum sur les crochets. Régler la hauteur souhaitée par l'intermédiaire du tube coulissant, en le serrant grâce à la molette de réglage. Si nécessaire, bloquer le pied mobile en serrant les 2 roues équipées de freins.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Chaque crochet supporte un poids maximal de 2 Kg.

La hauteur maximale de réglage de la tige est de 2100 mm.

Veiller à ce que la surface au sol soit plane ou que l'inclinaison soit inférieure à 5,7° (10% de pente) pour éviter le basculement du pied.

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente.

Avant utilisation, nettoyer le pied à sérum avec un produit nettoyant-désinfectant adapté au milieu médical (produit en solution, spray ou lingettes pré-imprégnées prêts à l'emploi).

#### MONTAGE DU PIED A SERUM :

- 1) Enlever le boulon et la rondelle en dessous du tube.
- 2) Insérer le tube avec l'embout noir sur le pied à 5 branches.
- 3) Fixez le tout par l'intermédiaire du boulon en mettant la rondelle en dessous du pied.

